

Elektromos orrszívó T10

Használati útmutató

Tartalom

1. A termék bemutatása 1	01
2. A termék bemutatása 2	02
3. A termék bemutatása 3	03
4. Termék specifikációk	04
5. Összeszerelés	05
6. Tisztítás 1.2	06
7. Tisztítás 3	07
8. Használat 1.2.3	08
9. Használat 4	09
10. Használat 5	10
11. Figyelmeztetések	11

12. Garancia	12
--------------	-------	----

01/ A termék bemutatása 1

① Orrszívó készülék



Orrszívó készülék

② Szilikon csőr:



Gömbölyű
csőr*2 :

0-3 éves korig



Egyenes
csőr*2 :

3 éves kor
felett

③ Gyűjtőedény, gyűjtőedény fedél, cső



Gyűjtőedény



Gyűjtőedény fedél



Cső

A termék bemutatása 2

01



02/A termék bemutatása 3

Töltöttség jelző

(kérjük töltsse fel, amikor az utolsó LED csík villog)

Szívóerő szintjelző

(6 fokozat)

Működést jelző fény

Fokozat állító -

(hosszan nyomva csökkent -)

Zene Be/Ki

(1 másodperc hosszán nyomja meg)

Fokozat állító +

(hosszan nyomva növel +)

Fehér zaj Be/Ki

(1 másodperc hosszán nyomja meg)

Ki/be kapcsoló

(3 másodperc hosszán nyomja)

szünet/start

(rövid gombnyomás)

Éjszakai fény

Be/Ki/Fényerő állítás

Az orrszívó memória és automata lekapcsoló funkcióval rendelkezik:

A termék bemutatása 4

1. Megjegyzi az utolsó használt szívóerősséget, zenét, hangerőt, és éjszakai fényerősséget.
2. Az orrszívó 10 perc használat után automatikusan szünet állapotra kapcsol.

03/ A termék bemutatása 5



Miután megtisztította a gyűjtőedényt, helyezze a csövet a levegő kivezető nyílásba, hogy megszárítsa azt.

Váladék szívásához helyezze a csövet a szívó nyílásba.

Töltő csatlakozó



Töltésre csak 5V-os adaptert használjon.

A termék bemutatása 6

03



04/ Termék specifikációk



Termék specifikációk

A termék neve	Elektromos orrszívó
Száma	T10
Anyag	ABS, Szilikon
Bemeneti feszültség	5V = 1A
Működési feszültség	3.7V
Akkumulátor	2000mAh


Termék specifikációk

Gyűjtőedény

30ml (MAX)


05/ Összeszerelés

Az orrszívó egy nagyon egyszerű készülék, 3 lépésben összeszerelhető:

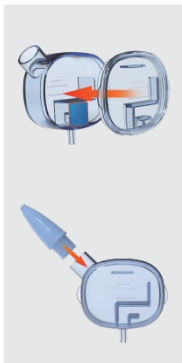

① Helyezze a szivacsot a gyűjtőedény szívócsatornájába és a fedéllel zárja le azt..

② Helyezze a csőrt a gyűjtőedényre.

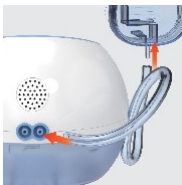

③ A csővel kösse össze a gyűjtőedényt és a készüléket.

Összeszerelés


Figyelem: A gyűjtőedény fedele csak egy meghatározott irányból zárható.



06/ Tisztítás 1,2




① Először kapcsolja ki a készüléket. Szerelje szét a gyűjtőedényt. Hogy elkerülje a készülék károsodását, a készülék fő egységét ne merítse vízbe .

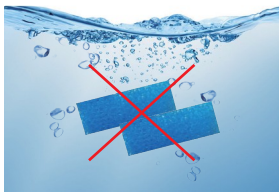

② A szivacs eldobható, nem szükséges tisztítani. Ne használja újra, hogy elkerülje a fertőzésveszélyt.

07/ Tisztítás 3

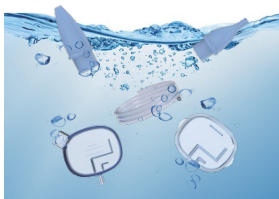

③ A gyűjtőedény, a fedél, és a szilikon csőrök vízben elmoshatóak, vagy gőzzel, forró vízzel, UV lámpával sterilizálhatóak. A szilikon csőr belseje kis kefével tisztítható.

Tisztítás 3

07



08/Használat 1.2.3




- ① Kérjük használja az életkornak megfelelő szilikon csőrt, a gömbölyű csőr 0-3 éves korig, az egyenes csőr 3 éves kor felett megfelelő.
- ② Helyezze a szilikon csőrt az orrlyukba, gyengéden forgassa használat közben, hogy ne egy pontban hasson a szívóerő.
- ③ Ha száraz a váladék az orrlyukokban, a feloldásra használjon normál sóoldatot, vagy távolítsa azt el a

Használat 1.2.3

mellékelt csipesszel mielőtt használja az orrszívót.

09/Használat 4.5

3 havonta

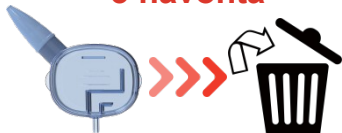

- ④ A fertőzésveszély elkerülése érdekében 3 havonta ajánlott cserélni a váladékgyűjtő tartályt.

- ⑤ A használatot mindig a legalacsonyabb fokozaton kezdje, csak lassan növelje azt, ne kezdje a készüléket a legmagasabb fokozaton használni.



Használat 4.5

10/Használat 6.7



⑥ Ha használat közben a váladék a csőbe kerül, azonnal állítsa le a készüléket, nehogy az orrváladék a készülékbe kerüljön és károsítsa azt.

⑦ Az orrszívó memória funkcióval rendelkezik: Megjegyzi az utolsó használt szívóerősséget, zenét, hangerőt, és az éjjeli

Használat 6.7

fényerősséget..

11 / Figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS

1. Csak felnőtt felügyelete alatt használható.
 2. Csak az orrváladék leszívására használható!
 3. Az orrszívó készülék nem játék!
 4. Ha az orrban nyílt seb, gyulladás vagy vérzés tapasztalható, ne használja az orrszívó készüléket!
-

Figyelmeztetések



Garancia

Köszönjük, hogy termékünket választotta! A termék jótállási ideje 2 év.

Az alábbi esetekre nem terjed ki a jótállás:

- ① Nem megfelelő tárolásból és alkatrész eltávolításból eredő sérülések (rágcsálók okozta sérülések, beázás).
- ② Nem megfelelő környezetben történő használatból eredő sérülések.
- ③ Nem megfelelő használatból eredő sérülések.
- ④ Külső erőhatásból eredő sérülések.

